

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ООО "Эндомир" официальный партнер
компании ООО "СитиЛабСервис"
в северо-западном регионе



ПЕРЕД ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ!

Удалите все клапаны, дистальные наконечники (если имеются) и другие отсоединяемые компоненты и погрузите их в раствор моющего вещества.



ТЕСТ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Накачайте воздух и, поворачивая ручки управления углом и вращения окуляра, следите за манометром! Если давление в норме, проведите тест на герметичность в воде, полностью погрузив эндоскоп в жидкость. Нет пузырей - приступайте к дезинфекции.



ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Полностью погрузите эндоскоп в дезинфицирующий раствор. Погрузите все клапаны, дистальный колпачок (если имеется) и все остальные отсоединяемые компоненты в дезинфицирующий раствор.



ПОСЛЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Проведя дезинфекцию - промойте чистой водой! После промывки - продуйте воздухом!

ВО ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ



Не замачивайте больше, чем на 30 минут в дезинфицирующем растворе!



Для видеоэндоскопов не забудьте надеть крышку на видеоразъем!



Не трогайте омыватель!



Не работайте прибором, не прошедшим тест на герметичность!



Промывайте каналы и внешние поверхности стерильно-фильтрованной или стерильной водой!



Обработайте резиновые уплотнители специальной смазкой!



Всегда используйте загубник!



Используйте инструментальный канал, когда вводимая часть выпрямлена!



Проверьте подключение к сети!



Будьте аккуратны! Переносите эндоскоп медленно, чтобы не ударить об пол или стены!



Протрите дистальный конец!